

# Zithoogte aanpak



## Werkwijze

### Stap 1:

Bepaal het configuratie-nummer a.d.h.v. de zithoogte, type zitkussen en zittinghoek. Het configuratie-nummer correspondeert met een regel in de zithoogtetabel


### Stap 2:

Kies de juiste tabel op basis van de voorwiel maat (5 inch, 6 inch of 8 inch).

### Stap 3:

Kies de juiste regel aan de hand van het configuratie-nummer en maat achterwiel.

Gemeten volgens onderstaande afbeeldingen, gemeten met zitdiepte D52, zwenkwielen georiënteerd in de rijrichting.

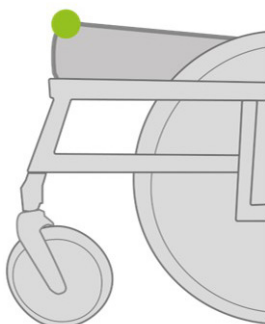

## Voorbeeld

Roxx The New Originalframe: 6 inch/22 inch – standaard telescoop

### Stap 1:

Zithoogte 50, Contour Deep, zithoek A  
=> Configuratie-nummer = 8

### Stap 2: 6 inch

=> Blauwe tabel

### Stap 3: 22 inch

=> 1 gat zichtbaar / 4e en 5e gat van boven

Zit-hoogte	Contour			Contour Deep/Xtra		
	A	B	C	A	B	C
39	1	x	x	x	x	x
40	1	x	x	x	x	x
41	2	1	x	1	x	x
42	3	1	1	1	x	x
43	4	3	1	2	1	x
44	5	4	2	3	2	1
45	5	5	3	4	3	1
46	6	5	4	5	4	2
47	7	6	5	5	4	3
48	8	7	5	6	5	4
49	9	8	6	7	6	5
50	10	9	7	8	7	5
51	11	9	8	9	8	6
52	12	10	9	10	9	7
53	13	12	10	11	9	8
54	13	12	11	12	10	9
55	14	13	12	13	11	10
56	15	14	12	13	12	11
57	16	14	13	14	13	12
58	17	15	14	15	14	13
59	18	16	15	16	14	13
60	19	17	16	17	15	14
61	20	19	17	18	16	15
62	x	20	18	19	17	16
63	x	x	19	20	19	17
64	x	x	20	x	20	18
65	x	x	x	x	x	19
66	x	x	x	x	x	20

Zit-hoogte	Seat base		
	A	B	C
36	1	x	x
37	2	1	x
38	3	2	x
39	4	2	1
40	4	3	2
41	5	4	3
42	6	5	3
43	7	6	4
44	8	6	5
45	8	7	6
46	9	8	6
47	10	9	7
48	11	10	8
49	12	11	9
50	13	11	10
51	13	12	11
52	14	13	12
53	15	14	12
54	16	15	13
55	17	15	14
56	19	16	15
57	20	17	16
58	x	19	17
59	x	20	17
60	x	x	19
61	x	x	20
62	x	x	x
63	x	x	x
64	x	x	x
65	x	x	x
66	x	x	x




# Zithoogte aanpak



Configuratienummer	Maat achterwiel	Voorwiel maat: 6 inch				Instelbereik armlegger	
		Type telescoop	Gatpositie voorwiel	Hulp-frame achter	Gatpositie achterwiel	Zonder werkbladhouderpijp**	Met werkbladhouderpijp**
3	22"	Trippel	onderste gat	x	2e en 3e gat v. boven		Vanaf gat 2
	24"	Trippel	onderste gat	x	1e en 2e gat v. boven	Vanaf gat 4	Vanaf gat 5
4	22"	Trippel	op een na onderste gat	x	3e en 4e gat v. boven		
	24"	Trippel	op een na onderste gat	x	2e en 3e gat v. boven	Vanaf gat 2	Vanaf gat 3
5	22"	Trippel	1 gat zichtbaar	x	3e en 4e gat v. boven		
	24"	Trippel	1 gat zichtbaar	x	2e en 3e gat v. boven	Vanaf gat 2	Vanaf gat 3
6	22"	Trippel	2 gaten zichtbaar	x	4e en 5e gat v. boven		
		Standaard	onderste gat	x	3e en 4e gat v. boven		
	24"	Trippel	2 gaten zichtbaar	x	3e en 4e gat v. boven		Vanaf gat 2
		Standaard	onderste gat	x	2e en 3e gat v. boven	Vanaf gat 2	Vanaf gat 3
7	22"	Trippel	3 gaten zichtbaar	x	4e en 5e gat v. boven		
	24"	Trippel	3 gaten zichtbaar	x	3e en 4e gat v. boven		Vanaf gat 2
8	22"	Trippel	4 gaten zichtbaar	x	5e en 6e gat v. boven		
		Standaard	1 gat zichtbaar	x	4e en 5e gat v. boven		
	24"	Trippel	4 gaten zichtbaar	x	4e en 5e gat v. boven		
		Standaard	1 gat zichtbaar	x	3e en 4e gat v. boven		Vanaf gat 2
26"	Trippel	4 gaten zichtbaar	x	3e en 4e gat v. boven	Vanaf gat 2	Vanaf gat 4	
9	22"	Standaard	2 gaten zichtbaar	x	5e en 6e gat v. boven		
	24"	Standaard	2 gaten zichtbaar	x	4e en 5e gat v. boven		
10	22"	Standaard	3 gaten zichtbaar	x	5e en 6e gat v. boven		
	24"	Standaard	3 gaten zichtbaar	x	4e en 5e gat v. boven		
11	22"	Standaard	4 gaten zichtbaar	x	6e en 7e gat v. boven		
	24"	Standaard	4 gaten zichtbaar	x	5e en 6e gat v. boven		
	26"	Standaard	4 gaten zichtbaar	x	4e en 5e gat v. boven		Vanaf gat 2
12	22"	Standaard	5 gaten zichtbaar	x	6e en 7e gat v. boven		
	24"	Standaard	5 gaten zichtbaar	x	5e en 6e gat v. boven		
	26"	Standaard	5 gaten zichtbaar	x	4e en 5e gat v. boven		Vanaf gat 2
13	24"	Standaard	6 gaten zichtbaar	x	6e en 7e gat v. boven		
	26"	Standaard	6 gaten zichtbaar	x	5e en 6e gat v. boven		
14	24"	Verlengd	4 gaten zichtb. verlengd	x	6e en 7e gat v. boven		
	26"	Verlengd	4 gaten zichtb. verlengd	x	5e en 6e gat v. boven		
15	26"	Verlengd	5 gaten zichtb. verlengd	x	6e en 7e gat v. boven		

\*\* In het geval van een blanco rij kan het volledige bereik van de armlegger gebruikt worden. (dus vanaf gat 1)

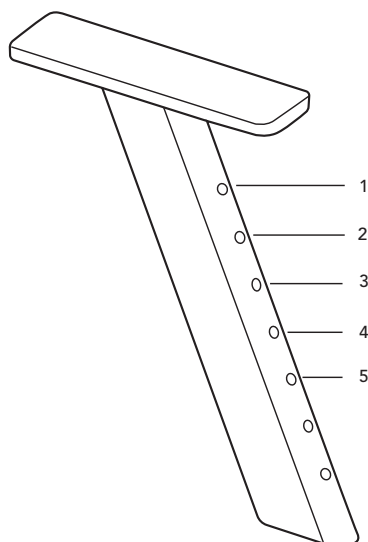



# Zithoogte aanpak



Configuratienummer	Maat achterwiel	Voorwiel maat: 5 inch				Instelbereik armlegger	
		Type telescoop	Gatpositie voorwiel	Hulpframe achter	Gatpositie achterwiel	Zonder werkbladhouderpijp**	Met werkbladhouderpijp**
1	22"	Trippel	onderste gat	x	1e en 2e gat v. boven	Vanaf gat 2	Vanaf gat 3
2	22"	Trippel	op een na onderste gat	x	2e en 3e gat v. boven		Vanaf gat 2
3	22"	Trippel	1 gat zichtbaar	x	2e en 3e gat v. boven		Vanaf gat 2
	24"	Trippel	1 gat zichtbaar	x	1e en 2e gat v. boven	Vanaf gat 4	Vanaf gat 5
4	22"	Trippel	2 gaten zichtbaar	x	3e en 4e gat v. boven		
	24"	Trippel	2 gaten zichtbaar	x	2e en 3e gat v. boven	Vanaf gat 2	Vanaf gat 3
5	22"	Trippel	3 gaten zichtbaar	x	3e en 4e gat v. boven		
	24"	Trippel	3 gaten zichtbaar	x	2e en 3e gat v. boven	Vanaf gat 2	Vanaf gat 3
6	22"	Trippel	4 gaten zichtbaar	x	4e en 5e gat v. boven		
	24"	Trippel	4 gaten zichtbaar	x	3e en 4e gat v. boven		Vanaf gat 2

Configuratienummer	Maat achterwiel	Voorwiel maat: 8 inch				Instelbereik armlegger	
		Type telescoop	Gatpositie voorwiel	Hulpframe achter	Gatpositie achterwiel	Zonder werkbladhouderpijp**	Met werkbladhouderpijp**
10	22"	Standaard	onderste gat	x	5e en 6e gat v. boven		
	24"	Standaard	onderste gat	x	4e en 5e gat v. boven		
11	22"	Standaard	op een na onderste gat	x	6e en 7e gat v. boven		
	24"	Standaard	op een na onderste gat	x	5e en 6e gat v. boven		
	26"	Standaard	op een na onderste gat	x	4e en 5e gat v. boven		Vanaf gat 2
12	22"	Standaard	1 gat zichtbaar	x	6e en 7e gat v. boven		
	24"	Standaard	1 gat zichtbaar	x	5e en 6e gat v. boven		
	26"	Standaard	1 gat zichtbaar	x	4e en 5e gat v. boven		Vanaf gat 2
13	24"	Standaard	2 gaten zichtbaar	x	6e en 7e gat v. boven		
	26"	Standaard	2 gaten zichtbaar	x	5e en 6e gat v. boven		
14	24"	Standaard	3 gaten zichtbaar	x	6e en 7e gat v. boven		
	26"	Standaard	3 gaten zichtbaar	x	5e en 6e gat v. boven		
15	26"	Standaard	4 gaten zichtbaar	x	6e en 7e gat v. boven		
16	26"	Standaard	5 gaten zichtbaar	x	6e en 7e gat v. boven		
17*	26"	Standaard	6 gaten zichtbaar	x	6e en 7e gat v. boven		
18	26"	Standaard	6 gaten zichtbaar	Ja	7e en hulpgat v. boven		
19	26"	Verlengd	4 gaten zichtb.	Ja	7e en hulpgat v. boven		
20*	26"	Verlengd	5 gaten zichtb.	Ja	7e en hulpgat v. boven		

\* Geen adviesconfiguratie i.v.m. framehoek

\*\* In het geval van een blanco rij kan het volledige bereik van de armlegger gebruikt worden. (dus vanaf gat 1)

